





FOGLIETTO ILLUSTRATIVO PER AUTOTEST

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima
di iniziare il test

“Prenditi un minuto per la tua salute”

CONTENUTI INSTI® KIT

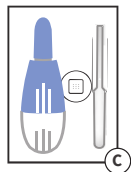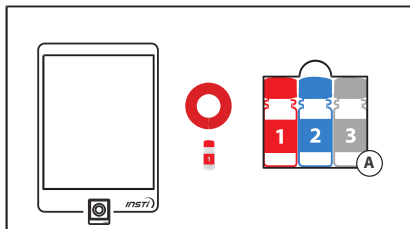

A. BOTTIGLIETTE 1, 2, 3



B. CONFEZIONE UNITÀ MEMBRANA



CONTIENE L'UNITÀ MEMBRANA
Il puntino di controllo e/o del test apparirà al termine del test.

C. KIT RACCOLTA SANGUE



LANCETTA
Sterile monouso;
per raccogliere il sangue.

STERILE

CE 0050



PIPETTA
Da usare per
raccogliere
il sangue



**CEROTTO
ADESIVO**

**D. BUSTINA PER
RIFIUTI**

**E. FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
PER AUTOTEST**

PRIMA DI INIZIARE



Video di istruzioni
disponibile su:
www.insti-hivselftest.it



Effettuate il test
in un luogo
ben illuminato



Usate una
superficie
piana ed asciutta



Pulite
e asciugate
le mani




Facoltativo:
fazzoletti per asciugare
eventuali fuoriuscite

PREPARAZIONE

A. Aprire la confezione
dell' **UNITÀ MEMBRANA**


Posizionare l'unità
membrana sul supporto

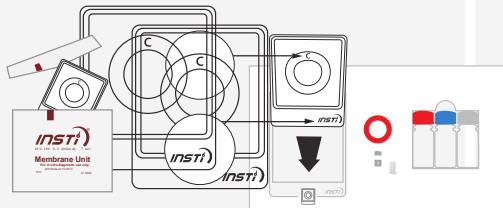

B. Posizionare la
BOTTIGLIETTA 1
sul supporto rosso.
TOGLIERE IL TAPPO
e appoggiarlo vicino.




ATTENZIONE:
La bottiglietta 1
contiene liquidi.
Maneggiare con cura.

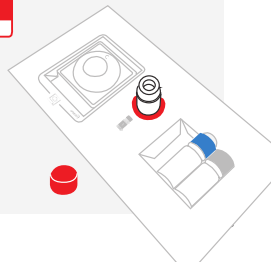


STEP 1 - RACCOLTA SANGUE

Per ulteriori informazioni consultare le Istruzioni per l'Uso.


- B.** Ruotare e staccare la punta della lancetta. Gettare la punta.

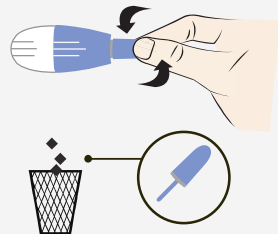


- C.** Posizionare la lancetta lateralmente alla punta del dito. Premere **FORTE** fino a sentire un click.

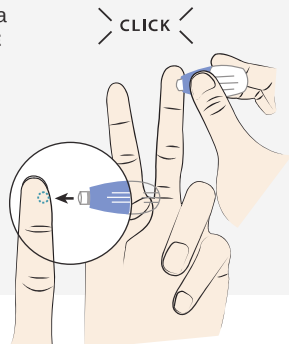

- A.** STROFINARE MANI e DITA per aumentare l'afflusso di sangue.

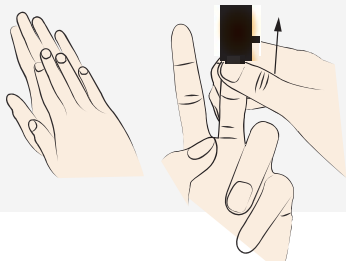


- D.** Strofinare il dito per ottenere un'**ABBONDANTE** goccia di sangue.

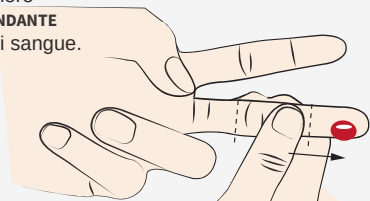

- E.** Posizionare la punta della pipetta in posizione **OBLIQUA** rispetto alla goccia di sangue. Raccogliere sangue fino alla linea nera.

TIP Non premere il bulbo della pipetta. Non coprire la presa d'aria.


ATTENZIONE Disporre la pipetta in posizione obliqua come mostrato in figura.

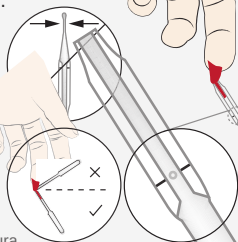

- F.** Inserire immediatamente la pipetta nella bottiglietta 1 e spremervi il sangue.


RICHIUDERE la bottiglietta 1.

TIP Coprire la presa d'aria.

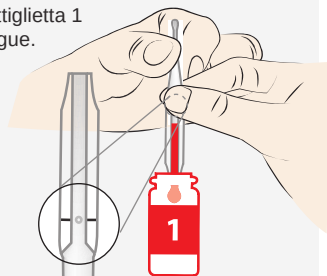


- G.** Applicare il cerotto

? Per problemi nella raccolta Domande Frequenti nelle I

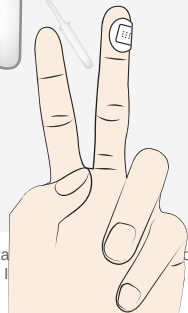


STEP 2 - TEST

BOTTIGLIETTA 1 SCUOTERE 4 VOLTE

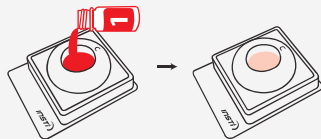

- A. SCUOTERE** 4 volte e **VERSARE** tutto il liquido.
Attendere fino alla scomparsa del liquido.


BOTTIGLIETTA 2 SCUOTERE 4 VOLTE

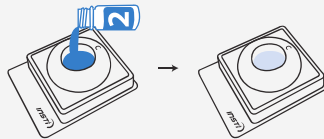

- B. SCUOTERE** 4 volte e **VERSARE** tutto il liquido.
Attendere fino alla scomparsa del liquido.

TIP Potrebbe essere necessario dare qualche colpo alla bottiglietta 2 per far uscire tutto il liquido.

BOTTIGLIETTA 3

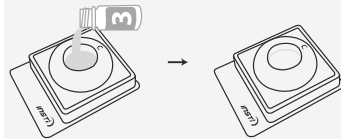


- C. Senza scuotere** **VERSARE** tutto il liquido.
Attendere fino alla scomparsa del liquido.

ATTENZIONE:
Se si verifica un versamento, proseguire con il test.


STEP 3 - GUIDA AL RISULTATO

Leggere subito i risultati e comunque **ENTRO 5 MINUTI**

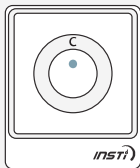


NEGATIVO

Il risultato del vostro test è negativo.

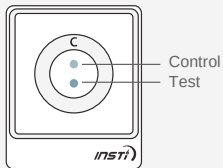

POSITIVO

Il risultato del vostro test è positivo.
Siete probabilmente positivi all'HIV.
I risultati positivi devono essere
confermati da un medico.

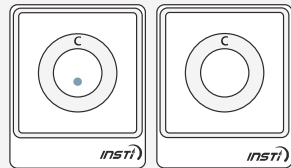

NULLO

Il vostro test non ha funzionato.

TIP

I puntini di test e controllo possono non essere della stessa tonalità di blu; uno può risultare più chiaro dell'altro. In rari casi, potrebbe comparire un leggero anello nell'area del puntino del test, questo indica che il risultato è positivo e che siete probabilmente positivi all'HIV.

IL VOSTRO RISULTATO

Risultato negativo

Come per molti test, c'è la possibilità di falsi risultati. Per ridurre questa possibilità, assicuratevi di aver seguito le istruzioni ed usato il test correttamente. Se avete ottenuto un risultato negativo ma siete stati esposti ad attività ad alto rischio di HIV negli ultimi 3 mesi, potreste trovarvi nel cosiddetto "periodo finestra" ed è consigliabile ripetere il test in un momento successivo.

Risultato positivo

Consultate un medico il prima possibile informandolo/a di aver svolto il test di autodiagnosi per HIV. Tutti i risultati positivi devono essere confermati da un test di laboratorio.

Per saperne di più visitate:
www.insti-hivselftest.it

Cosa fare dopo un risultato positivo?


Avere l'HIV non significa avere l'AIDS. Con una diagnosi ed una terapia precoce è difficile sviluppare l'AIDS.

SMALTIMENTO

Nel test è inclusa una bustina richiudibile in plastica. Quando avrete portato a termine il test, riponete tutti gli elementi nella scatola, inclusa la lancetta di sicurezza ed i fazzoletti usati. Mettete la scatola nella busta e chiudetela.

Potete gettare la busta in maniera discreta tra i rifiuti di casa. Questo dispositivo non è riciclabile.

Smaltire secondo i regolamenti locali.

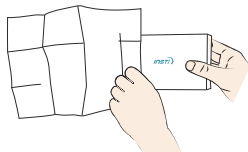

Rappresentante Autorizzato:
EMERGO EUROPE
Molenstraat 15, 2513 BH,
The Hague, The Netherlands

ScreenItalia
Test per la salute

Distribuito da: SCREEN ITALIA Srl
Via Volumnia, 40/B - 06135 - Perugia - Italia
www.screenitalia.it - info@screenitalia.it

CE 0543

©Copyright 2017
Tutti i diritti riservati.
51-1172F 15-Feb-2017



Consultare le istruzioni per l'uso.